

## Abnahme und Versand von Abstrichmaterial für die SARS-CoV-2 (COVID-19) PCR-Testung

### Allgemeine Hinweise:

- Ein Abnahmeset besteht aus einem **ABBOTT® Multicollect Röhrchen** samt beige-packtem Tupfer und einem **2er Set extra verpackter Holztupfer**.
- Abnahmebestecke werden von den Pilzambulatorien auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
- Beschriften des Röhrchens mit Vornamen, Nachnamen (**BLOCKBUCHSTABEN**) und Geburtsdatum des Patienten/der Patientin.
- Proben für die Testung können überbracht oder eingesendet werden.
- Die Kosten für die SARS-CoV-2 PCR sind privat zu tragen, keine Kassenleistung.
- Die Abnahme kann durch den Arzt oder den Patienten/die Patienten selbst erfolgen.

### Anleitung Probenabnahme Nasen-/Rachenabstrich:

- Führen Sie den **Multicollect Tupfer** in beide Nasenöffnungen so tief wie möglich ein, bis Sie einen Widerstand spüren. Streichen Sie mit drehender Bewegung das Sekret ab und quirlen den Tupfer in dem **ABBOTT® Multicollect Röhrchen** aus. Anschließend wird der Tupfer verworfen.
- Mit einem der extra verpackten **Holztupfer** nehmen Sie einen Abstrich von der Rachenschleimhaut, quirlen diesen in demselben **ABBOTT® Multicollect Röhrchen** aus und werfen den Tupfer.

### **Lagerung und Transport:**

Lagerung der beimpften und unbeimpften Röhrchen bei Raumtemperatur bis zum Abtransport. Bitte beachten Sie bitte die entsprechenden Transportvorschriften (ansteckungsgefährlicher Stoff der Kategorie B der UN Nummer 3373). Nähere Hinweise zu Verpackung und Beförderung diagnostischer Proben finden Sie unter: [www.pilzambulatorium.at](http://www.pilzambulatorium.at) („Arztbereich“ – „Verpackung und Versand“).

*Bitte beachten Sie, dass in den Pilzambulatorien derzeit keine Abstriche für die Corona-Virus-Abklärung durchgeführt werden. Bei berechtigtem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion erfolgt die Probenabnahme durch den Ärztefunkdienst oder das Rote Kreuz (Tel. 1450).*